



IBSA

ialuset®

Garze impregnate sterili
acido ialuronico 0,05%



FERITE e USTIONI NON INFETTE

PROPRIETÀ

ialuset® contiene acido ialuronico (sale sodico).

L'acido ialuronico è il principale componente della sostanza fondamentale del derma.

Grazie al suo peculiare potere igroscopico, in presenza di lesioni cutanee contribuisce a mantenere il giusto grado di idratazione del derma.

Esso agisce inoltre come coadiuvante nei processi di rigenerazione tissutale delle lesioni cutanee, promuovendo il microambiente della ferita favorevole alla cicatrizzazione e alla ripielitizzazione.

INDICAZIONI

ialuset® è indicato nel trattamento di ferite e ustioni non infette, con o senza essudato, ulcere delle gambe, incluse quelle di origine venosa, ragadi, fistole, piaghe da decubito, ferite post-operatorie, dermatopatie abrasive ed escoriazioni di origine chimico-fisica.

COMPOSIZIONE

Ogni garza è impregnata con 4 g di crema contenente: acido ialuronico (sale sodico) 0,05%, glicerina pura anidra, polietilenglicole 4000, acqua deionizzata.

FORME E PRESENTAZIONI

Astucci da 10 garze (10 cm x 10 cm).

VIA DI SOMMINISTRAZIONE E POSOLOGIA

Pulire accuratamente la ferita prima di ogni applicazione, quindi procedere come descritto di seguito.

Aprire la busta in cui è contenuta la garza e dopo aver rimosso i due fogli protettivi, applicare la garza sulla ferita.

Tale medicazione può essere mantenuta in posizione con un appropriato bendaggio.

Applicare la garza ogni 24 ore sino a completa cicatrizzazione.

L'avvenuta cicatrizzazione della ferita deve essere valutata da un medico.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

ialuset® garze è previsto solo per il monouso.

ialuset® garze è sterile. Non sterilizzare nuovamente.

Non riutilizzare **ialuset® garze** per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Seguire le procedure appropriate per la pulizia e la disinfezione delle ferite, ustioni e delle aree cutanee adiacenti.

La crema rimasta sulla ferita dalla applicazione precedente può essere facilmente defersa con acqua prima di ogni applicazione successiva.

L'avvenuta cicatrizzazione della ferita deve essere valutata da un medico.

L'impiego di **ialuset® garze** sulle ulcere venose non preclude l'uso di un trattamento di compressione (calze o bendaggi).

Non usare **ialuset® garze** se il confezionamento risulta danneggiato.

In caso di qualsiasi dubbio sull'utilizzo di **ialuset®** consulti il suo medico o il farmacista

Solo per uso esterno.

Non ingerire.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONTROINDICAZIONI

ialuset® garze non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota all'acido ialuronico (sale sodico) o ad uno o più degli altri componenti.

EFFETTI INDESIDERATI

Reazioni locali di ipersensibilità come eczema, sono state raramente osservate.

SE NOTA LA COMPARSA DI UN EFFETTO INDESIDERATO CHE NON SIA MENZIONATO IN QUESTO FOGLIO ILLUSTRATIVO, CHIEDA CONSIGLIO AL SUO MEDICO O FARMACISTA.

CONSERVAZIONE

NON USARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

Questo dispositivo medico deve essere conservato a temperature inferiori a 25°C.

Anno di certificazione CE: 2012

Validità: 36 mesi.

La data di scadenza indica la validità massima del dispositivo medico

Data ultima revisione foglietto illustrativo: Giugno 2020

Fabbricante:

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – Italy

e-mail: info@ibsa.it | www.ibsa.it

CE 0051



Monouso



Verdere le istruzioni per l'uso



Non esporre a temperature superiori a 25°C

LOT

Lotto



Utilizzare entro il

STERILE R

Sterile per irraggiamento



Non usare se la confezione è danneggiata

Scopri la
linea **ialuset®**



Scopri di più su www.ialuset.it
← oppure scannerizza il QR code